

Nombre comercial del artículo: MASCARILLA HIGIENICA REUTILIZABLE

Descripción del artículo:

Mascarilla higiénica reutilizable.

Composición:

Mascarilla de varias capas compuestas de polipropileno hidrófobo y filtrante adecuado, de poliéster y viscosa.

Elastico: Elastómero 38%; Poliamida:62%
Sin látex.

Características:

Mascarillas adecuadas para personas adultas y/o niños sin síntomas no susceptibles de usar las quirúrgicas y/o EPI.

Reutilizable hasta 10 limpiezas.

Lavado: Sumergir en lejía dilución 1:50 con agua tibia durante 30 minutos, lavado a máquina con programa delicado a 30 °C y dejar secar al aire.

Tres pliegues nasales.

Tiras elásticas para sujetar en las orejas.

Período recomendable de uso continuado hasta 4 horas.

Certificado Öko-Text Standard 100, que garantiza la ausencia de sustancias perjudiciales



Este dispositivo no es un producto sanitario en el sentido de la Directiva 93/42 o del Reglamento

UE / 2017/745, ni un equipo de protección individual en el sentido del Reglamento UE / 2016/425.

Referencias:

MASK10LV Mascarilla higiénica reutilizable (pack 10 unidades)

MASK50LV Mascarilla higiénica reutilizable (pack 50 unidades)

MASK10LV Kids Mascarilla higiénica reutilizable XXS (pack 10 unidades)

MASK50LV Kids Mascarilla higiénica reutilizable XXS (pack 50 unidades)

MASK10LV Kids Mascarilla higiénica reutilizable XS (pack 10 unidades)

MASK50LV Kids Mascarilla higiénica reutilizable XS (pack 50 unidades)

MASK10LV Kids Mascarilla higiénica reutilizable S (pack 10 unidades)

MASK50LV Kids Mascarilla higiénica reutilizable S (pack 50 unidades)

Tallas	Edad	Medidas
XXS	De 3 a 5 años	5,5 cm alto x 13 cm ancho
XS	De 6 a 9 años	6,5 cm alto x 15 cm ancho
S	De 10 a 12 años	8,5 cm alto x 17 cm ancho
Adulto	Mayor de 12 años	9,5 cm alto x 18 cm ancho

Normativa:

Cumplimiento de las especificaciones de la norma **UNE 0065:2020 Mascarillas higiénicas reutilizables** para adultos y niños. Requisitos de materiales, diseño, confección, marcado y uso.

Datos ensayos realizados por AITEX:
Filtración bacteriana (BFE) >90 %
Respirabilidad <60 Pa/cm²

Etiquetado:

MASK50LV MASCARILLA HIGIENICA REUTILIZABLE

Color Lado / Side
BLANCO

Talla / Size
UNICA

MASK50 Lot. 000000000 **8432679381647**

especialidades médico ortopédicas, sl B46047999
Cl. Camino Pascualeta, 40 - 46200 Paiporta Made in Spain



(01)08432679381647(10)000000000

MASK50

MASK50LV MASCARILLA HIGIENICA REUTILIZABLE (50 UD.)
TALLA UNICA | LADO | COLOR BLANCO

Instrucciones:

Mascarilla Higiénica Reutilizable



EMO
especialista
en ortopedia

ESPECIFICACIÓN UNE 0065:2020

Conforme a las indicaciones del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para la elaboración de mascarillas higiénicas reutilizables para adultos y niños. Requisitos de materiales, diseño, confección, marcado y uso.

COMPOSICIÓN

Diversas capas compuestas de polipropileno hidrófobo, poliéster y viscosa.

TALLAS

TALLA	EDAD	ALTO x ANCHO
XXS	3 a 5 años	5,5x13 cm.
XS	6 a 9 años	6,5x15 cm.
S	10 a 12 años	8,5x17 cm.
Adulto	> 12 años	9,5x18 cm.

REFERENCIAS

MASK 50LV KIDS Mascarilla higiénica infantil reutilizable (Pack 50 Uds.)

MASK 10LV KIDS Mascarilla higiénica infantil reutilizable (Pack 10 Uds.)

MASK 50LV Mascarilla higiénica reutilizable (Pack 50 Uds.)

MASK 10LV Mascarilla higiénica reutilizable (Pack 10 Uds.)

PERÍODO RECOMENDABLE DE USO

Tiempo de uso recomendable continuado hasta 4 horas.

LAVADO Y SECADO

Reutilizable hasta 10 limpiezas. Sumergir en lejía dilución 1:50 con agua tibia durante 30 minutos, lavado a máquina con programa delicado a 30 °C y dejar secar al aire.

DATOS TESTADOS DE FILTRACIÓN BACTERIANA (BFE) Y RESPIRABILIDAD

BFE(%) >90; Respirabilidad (Presión diferencial) (Pa/cm²) <60.

INSTRUCCIONES

Colocación de la mascarilla



CON MASCARILLAS INFANTILES REALIZAR BAJO LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO

1. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica antes de manipular la mascarilla;
2. Identificar la parte superior de la mascarilla;



3. Sostener la mascarilla desde el exterior y sujetar el anverso de cabeza detrás de la misma o a ambos lados de las orejas, sin cruzarlos.

4. Bajar la parte inferior de la mascarilla a la barbilla

5. Pellizcar la pinza nasal con ambas manos para ajustarla a la nariz.

Retirada de la mascarilla

Para evitar la contaminación al retirar una mascarilla, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Quitarse los guantes de protección;
2. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica;
3. Retirar la mascarilla sin tocar la parte frontal de la mascarilla;
4. Si se va a reutilizar la mascarilla lavarla a 60° y secarla al aire y si se va a desechar definitivamente hacerlo en un contenedor provisto de una bolsa de plástico;
5. Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica.

MASCARILLA HIGIÉNICA REUTILIZABLE

Este dispositivo no es un producto sanitario en el sentido de la Directiva 93/42 o del Reglamento UE / 2017/745, ni un equipo de protección individual en el sentido del Reglamento UE / 2016/425.



ESPECIALIDADES MÉDICO ORTOPÉDICAS, S.L.
Pol. Ind. La Pascualeta - Camino de La Pascualeta, 40
46200 Paiporta (Valencia) España
www.emo.es +34 963 132 051

OEKO-TEX®
CERTIFICADO DE TEXTILES
STANDARD 100
JOURNALISTEN ATTEST
Control de sustancias nocivas.
www.oeko-tex.com/standard100

CE
MADE IN SPAIN