


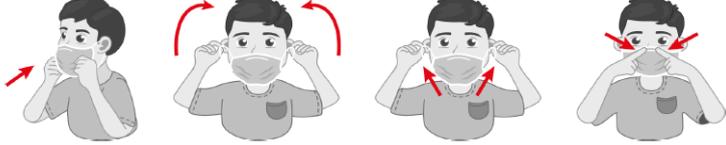

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO	KIT MASCARILLA INFANTIL + JABÓN HIGIENIZANTE
REFERENCIA	12.044.13
COMPOSICIÓN	Tejido de una capa 50/50 Poliéster/Algodón con tratamiento bactericida y fungicida Sanitized®
LEGISLACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ensayo de eficiencia EFB: 91 % - Tipo I ▪ Cumple test de respirabilidad tipo IIR ▪ Cumple Norma ISO EN-14683:2019 + AC:2019 de mascarillas quirúrgicas punto 5.2.2, 5.2.3 y 5.2.4 para tipo I, II y IIR ▪ Cumple Especificaciones UNE 0065:2020 Mascarillas higiénicas reutilizables.
DESCRIPCIÓN	<p>Mascarilla higiénica y ecológica con filtración bacteriana. Lavable y reutilizable.</p> <p>Protege las vías respiratorias de los más pequeños proporcionando una gran protección contra enfermedades que pueden propagarse en ciertos entornos.</p>
CARACTERÍSTICAS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Producto no estéril ▪ Reutilizable ▪ Color: blanco/rosa o blanco/azul ▪ Talla única ▪ Cobertura de nariz, boca y barbilla. ▪ Hasta 15 lavados sin perder efectividad ▪ Edad recomendada: hasta 12 años.
PRESENTACIÓN	Envase que contiene 1 mascarilla + jabón higienizante de uso individual (más de 100 usos)
MODO DE USO	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lavar las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica antes de manipular la mascarilla. ▪ Identificar la parte superior de la mascarilla. ▪ Posicionar la mascarilla en la cara, a la altura de la nariz. ▪ Sostener la mascarilla desde el exterior y colocar los elásticos alrededor de las orejas sin cruzarlos. ▪ Bajar la parte inferior de la mascarilla a la barbilla. ▪ Verificar que la mascarilla cubre la barbilla y está colocada correctamente siguiendo el siguiente esquema:

<p>MODO DE USO</p>	<p>Niños </p>  <ul style="list-style-type: none"> ▪ Intentar no tocar la mascarilla en la medida de lo posible una vez ajustada y no tocar la parte interior con los dedos.  <ul style="list-style-type: none"> ▪ Si se necesita tocar la mascarilla, se debe previamente lavarse las manos con agua y jabón o frotárselas con una solución hidroalcohólica.  <ul style="list-style-type: none"> ▪ Para retirarla la mascarilla evitando la contaminación, se deben quitar los guantes de protección si se llevan, lavarse las manos con agua y jabón o en su defecto frotarlas con solución hidroalcohólica, retirar las mascarillas sin tocar la parte frontal retirando los elásticos de las orejas y lavarse las manos de nuevo. ▪ Durante la colocación, uso y retirada de estas mascarillas higiénicas se debe contar con la supervisión de un adulto.
<p>ADVERTENCIAS</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Este dispositivo no es un producto sanitario en el sentido de la Directiva 93/42 o del Reglamento UE/2017/745, ni un producto de protección individual en el sentido del Reglamento UE/2016/425. ▪ De uso personal ▪ Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un tiempo superior a 4h. En caso de deterioro por el uso, se recomienda sustituirla por otra. ▪ La mascarilla debe lavarse cada vez que se ensucie, humedezca o no se pueda colocar correctamente sobre la cara. ▪ No se debe usar si está sucia o húmeda. ▪ En caso de que se vaya a almacenar temporalmente se debe evitar el contacto con cualquier superficie. ▪ No colocar la mascarilla en una posición de espera en la frente o debajo de la barbilla durante y después de su uso. 