




INDICACIONES
Ortesis simple para la inmovilización cervical, indicada en caso de:

- Esquiñones leves a moderados sin estabilidad.
- Traumatismos de las partes blandas (latigazo cervical).
- Traumatismos óseos leves, por ejemplo en las apofisis espinosas o transversas.
- Procesos reumáticos en fase dolorosa.
- Cervicobraquialgias.
- Protección postoperatoria (determinados casos de artrodesis, laminectomías, torticolis tratadas quirúrgicamente,...).

CONTRAINDICACIONES
No usar en caso de alergia a algún componente.

COMPOSICIÓN
Espuma de poluretano flexible con recubrimiento tubular de algodón lavable, abrochado en la parte posterior con velcro. Funda de punto de algodón lavable.
No contiene látex natural.

INSTRUCCIONES Y PRECAUCIONES DE USO
El profesional sanitario es el responsable de elegir la talla adecuada, y de colocar el collarín en el paciente realizando los ajustes correspondientes.
- Selección de la talla: Para elegir la talla correcta se medirá el perímetro del cuello y se consultará la tabla de equivalencias de este estuche.
- Ajuste y colocación inicial: El profesional sanitario colocará el collarín en el paciente y le instruirá sobre cómo colocarlo, y llevará a cabo el ajuste correcto del mismo. Este punto es importante ya que un collarín demasado apretado puede comprimir la glotis, mientras que un collarín demasado holgado puede disminuir la eficacia terapéutica. Una vez realizado este ajuste, mantenimiento en todo momento y no modificarlo.

ADVERTENCIAS
- Utilizar solamente en un mismo paciente.
- En caso de observar que el ajuste no es el correcto, o de manifestarse algún efecto secundario, suspender la utilización del producto y consultar con su médico.
- No modificar la estructura del producto para no alterar su normal funcionamiento.
- Dessecar el producto si está deteriorado o es defectuoso, conforme a la normativa vigente de residuos en su zona.
- Mantener alejado de cualquier fuente fuerte de calor.

Importante: Cualquier incidente grave relacionado con el producto debe comunicarse al fabricante y a la autoridad sanitaria del país donde ha ocurrido.

Collarín cervical espuma blanda

CORYSAN®

Collarín Espuma Blanda

TALLA	1	2	3	4
C.N.	372052,6	372060,1	372078,6	372086,1
Perímetro cuello (cm.)	36	39	42	44

Fabricado en España

Collarín cervical espuma blanda



Collarín cervical espuma blanda

CORYSAN®



Atención al cliente: **936 473 310** | www.corysan.es

Sede legal: C/ Tellez, 22, Local C - 28007 Madrid
Sede administrativa: Av. Siglo XXI, 67 - 08840 Viladecans (Barcelona) ESPAÑA

© Copyright CORYSAN S.A. 1.997 (Rev.: 12-24)
La propiedad industrial del producto, su marca registrada y diseño son propiedad de CORYSAN S.A. Prohibida su reproducción total o parcial.

Marca Nacional Registrada - National Trademark - Pat. 813824
Marca Comunitaria Registrada - EC Trademark - Pat. 308932
Marca Internacional Registrada - International Trademark - Pat. 495928
Marca en Reino Unido Registrada - United Kingdom Trademark - Pat. UK00900308932